


TUTORIEL

Fabrication de masques pour les professionnels soignants
de la Fondation Marie-Louise

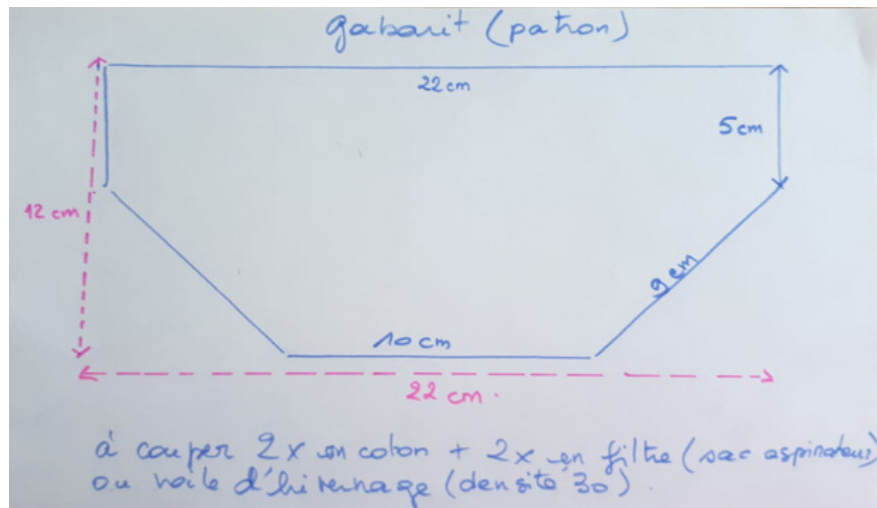

VOTRE KIT DE FABRICATION

validé par le médecin coordonnateur de la Fondation

- tissu (coton), drap par ex.
- sac d'aspirateur ou voile d'hivernage densité 30g/m²
- ruban ou biais pour les accroches (8cm)
- élastique plat ou choucou
- fil de fer ou de cuivre (8cm)
- ciseaux, pince coupante

ÉTAPE 1



Découper le gabarit dans du carton rigide, les coutures sont incluses.

ÉTAPE 2



Reporter sur le tissu plié en deux, ainsi que sur le voile ou sac aspi (filtre). Découper.

ÉTAPE 3



Poser une épaisseur de filtre de chaque côté du tissu.

ÉTAPE 4



Insérer le lien avec l'élastique de chaque côté puis piquer les 3 côtés.

ÉTAPE 5



Faire la couture du 4ème côté en laissant un passage pour le fil de fer. Passer le fil de fer (ou cuivre) et lui donner la forme pour le nez. L'élastique plat peut également être utilisé pour faire le tour de la tête (30cm).



Fondation
Marie-Louise